


★ 取扱説明書 ★ 必ずお読み下さい。★

内容品 取扱説明書・CHECK MATE 1 (液体)・CHECK MATE 2 (粉末)・スポイド・吸取紙

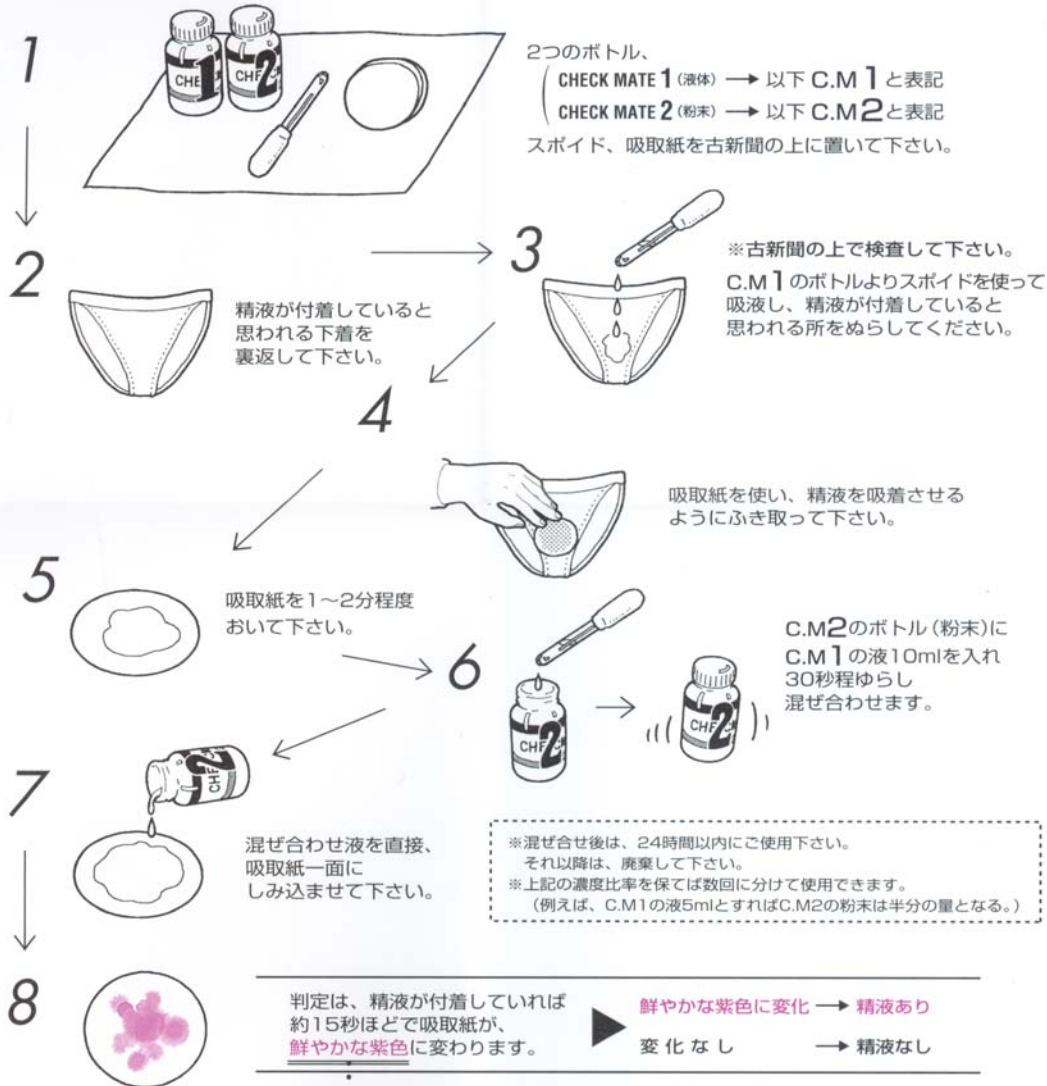

※混ぜ合わせ後は、24時間以内にご使用下さい。
それ以降は、廃棄して下さい。
※上記の濃度比率を保てば数回に分けて使用できます。
(例えば、C.M1の液5mlとすればC.M2の粉末は半分の量となる。)

...▶ パッケージシールの紫色に近い色が出ます。

- ★鮮やかな紫色に変わらなければ精液は、付着していないということになります。※うすいピンクになる場合があります。
- ★尚、3分以上経過した後、赤色・黄色や薄い紫色が現れた時も精液は、付着していません。